



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство полимерное с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения спиртового раствора салициловой кислоты 2% УПТС «Ск-ЛЕККЕР»- 3
ТУ 9398-005-54291689-2004

1. Назначение

Устройство предназначено для хранения и нанесения раствора спиртового раствора салициловой кислоты 2% на строго ограниченные участки кожных покровов.

2. Основные технические характеристики

Полимерное устройство состоит из колпачка, корпуса и накопителя, пропитанного раствором перекиси водорода. В горловину корпуса при помощи переходника вставлен полимерный пористый стержень, который, соприкасаясь с накопителем, пропитывается антисептическим раствором.

Объем вносимого в устройство спиртового раствора составляет 5 мл.

Масса устройства – $14,0 \pm 2,5$ гр.

Габаритные размеры составляют $100,0 \times 20,0$ мм.

3. Противопоказания к применению

Противопоказано при индивидуальной непереносимости раствора спиртового раствора салициловой кислоты 2%.

4. Порядок работы

- Открыть колпачок;
- При помощи стержня, пропитанного раствором, обработать края раны или участок кожного покрова;
- Закрыть колпачок.

5. Правила хранения и использования

Хранить в соответствии с условиями, указанными на этикетке.

Срок годности 1,5 года (18 месяцев)

Использовать до даты, указанной на этикетке.

Согласовано:

Начальник ОКК
Отдел маркетинга
Начальник регуляторного отдела

Тулубенская А.А.
Герасимов И.В.
Каулина И.В.

КОПИЯ ВЕРНА

