

МАНЖЕТА

A&D
Эй энд Ди, Япония

к приборам для измерения артериального
давления и частоты пульса

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Японская компания A&D Company, Ltd. (Эй энд Ди Компани, Лимитед) благодарит Вас за покупку манжеты к приборам для измерения артериального давления и частоты пульса, обеспечивающей безболезненное измерение артериального давления.

Область применения

Манжета предназначена для использования с цифровыми автоматическими и полуавтоматическими приборами для измерения артериального давления и частоты пульса.

Комплектация

1. Манжета (малого, стандартного, большого размеров).
2. Соединительная трубка.
3. Коннектор для соединения с прибором для измерения артериального давления и частоты пульса
4. Руководство по эксплуатации

Выбор правильного размера манжеты

Использование манжеты, не соответствующей размеру руки пользователя, искажает результат измерения артериального давления. Если манжета мала, результат измерения может быть завышен, если велика - может быть занижен. Измерьте окружность Вашей руки и выберите соответствующий тип манжеты.




Малая	18 - 22 см	Мягкая
Стандартная	22 - 32 см	Мягкая
Стандартная	23 - 37 см	Мягкая
Большая	32 - 45 см	Мягкая
Стандартная	17 - 32 см	Каркасная
Большая	22 - 43 см	Каркасная

Правила эксплуатации

1. Вставьте коннектор соединительной трубки в разъем, установленный на боковой панели прибора.

2. Наложите манжету на плечо на расстоянии 2-3 см выше локтевого сгиба. Не закатывайте рукава одежды, так как это может помешать току крови в сосудах, и не выполняйте измерения в одежде из плотной ткани.

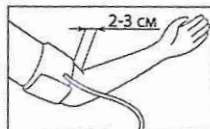

3. Плотно закрепите манжету. Накачка плохо закрепленной или незакрепленной манжеты может привести к ее разрыву.

4. Убедитесь в том, что трубка нагнетания воздуха в манжету находится над локтевой ямкой.

Хранение и уход

- Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок.

- Оберегайте манжету и соединительную трубку от острых предметов.

- Очистку манжеты необходимо проводить мягким ватным тампоном (или мягкой тряпочкой) с использованием слабого мыльного раствора.

Не используйте влажную ткань для протирания разъема подключения манжеты (он должен оставаться сухим).

Никогда не используйте спирт, бензин, растворитель или другие агрессивные химикаты для чистки манжеты. Дезинфекцию манжеты необходимо проводить мягким ватным тампоном (или мягкой тряпочкой) с использованием

3% раствора перекиси водорода или с использованием 3% раствора перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора нейтрального моющего средства.

Стерилизация манжеты не предусмотрена.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации манжеты -1 год.

Изготовитель: A&D Company, Limited

(завод A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd, Китай), ЯПОНИЯ

Импортер в Республике Беларусь:

ООО «НормоМед», 220034, г. Минск, ул. Румянцева, д.3, пом.16-5

тел/факс: (+375 17) 393-94-06

Регистрационное удостоверение МЗ РБ

№ ИМ-7.107159, действительно до 06.12.2023