

Инструкция по применению РАСТВОР ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И ПРОМЫВАНИЯ ГОРЛА

«SEA HARD Multiwave»
СРЕДНИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ
ТУ BY 192002495.008-2022

Наименование: раствор для орошения и промывания горла средний гипертонический «SEA HARD Multiwave».

Состав: вода деионизованная, морская соль, гиалуроновая кислота (натриевая соль).

Назначение: предназначен для применения у взрослых и детей старше шести лет, как вспомогательное средство, для поддержания естественной функции и регенерации слизистой оболочки рта и глотки, в том числе при фарингите, ангине, простудных заболеваниях и кашле, сопровождающихся дискомфортом в области горла и хрипотой.

Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения: Оториноларингология

Показания к применению:

Профилактика и комплексное лечение острых и хронических респираторных заболеваний полости рта и глотки (инфекционных, атрофических):

- острые и хронические фарингиты, тонзиллиты
- ларингиты, стоматиты, гингивиты, пародонтиты

Профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ и т.д.)

Профилактика и комплексное лечение состояний после хирургических вмешательств в полости рта и горла.

Свойства: раствор для орошения и промывания горла средний гипертонический «SEA HARD Multiwave» способствует физическому удалению избытка жидкости и слизи снимает отек и заложенность рта и глотки

- Тщательно промывает все отделы полости рта и глотки;
- Оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение;
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости рта и глотки;
- Уменьшает дискомфорт и сухость в полости рта и горла;
- Повышает местный иммунитет.

- Процедура не опасна беременным женщинам, поэтому врачи рекомендуют ее в качестве первой лечебной и профилактической меры при воспалительных патологиях гортани.

- Средство отлично справляется с дискомфортом, покраснением и скоплением гнойно-некротического налета в лакунах миндалин при воспалении вирусной и бактериальной этиологии.

Полоскание горла солевым раствором эффективно

- предотвращает распространение инфекции вниз по дыхательным путям;
- повышает местную сопротивляемость эпителия инфекциям;
- уменьшает воспаления, разжижает густую мокроту и ускоряет ее отхождение;
- облегчает процессы дыхания и проглатывания пищи;
- для глубокого очищения слизистой и лакун от гнойных пробок, слущенного эпителия, патологического микробного налета.

Полоскание горла соленой водой помогает при многих воспалительно-инфекционных заболеваниях. При фарингите и ларингите обработка позволяет увлажнить слизистую, что крайне важно при данных заболеваниях, ведь ротоглотка становится воспаленной, отечной, ее покрывает разлитое покраснение.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав раствора.

Особые указания:

- Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.
- Безопасен при проглатывании!

Способ применения:

Носик распылителя поставить в горизонтальное положение и распылить раствор в горло, 1-3 раза, направляя на очаг воспаления. После процедуры сплевывают остатки раствора в раковину, ротовую полость не споласкивают водой, чтобы раствор продолжал действовать 10-15 минут.

Внимание: перед применением необходимо встряхнуть флакон!

Побочные эффекты: не выявлены

Меры предосторожности: перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов флакон желательно использовать индивидуально.

Осмотрите препарат и упаковку перед применением. Не используйте раствор в случае нарушения целостности упаковки и самого медицинского изделия.

Форма выпуска и упаковка: раствор во флаконе с насадкой распыляющей и инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия транспортировки: растворы транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки: температура от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте. Хранение раствора осуществляют при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С при относительной влажности не более 80 % (при плюс 25 °С). Не допускать замерзания.

Срок годности: срок годности раствора для орошения и промывания горла среднего гипертонического «SEA HARD Multiwave» - 3 года с даты изготовления; срок годности после вскрытия – 16 месяцев.

Не применять после истечения срока годности.

Стерильность: раствор является нестерильным.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Чистая река»
Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Центральная, 49, к. 9

Регистрационное удостоверение МЗ РБ: ИМ-7.111902 от 26.05.2022 г.