

Инструкция по применению РАСТВОР ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И ПРОМЫВАНИЯ НОСА И ГОРЛА НА ОСНОВЕ РАСТВОРА КОЛЛОИДНОГО СЕРЕБРА

«SILVER WATER Multiwave»

ТУ BY 192002495.008-2022

Наименование: Раствор для орошения и промывания носа и горла на основе раствора коллоидного серебра «SILVER WATER Multiwave»

Состав: вода деионизованная, водный раствор коллоидного серебра.

Назначение: предназначен для применения у взрослых и детей старше шести лет, как вспомогательное средство, для поддержания естественной функции и регенерации слизистой оболочки носа, рта и глотки, в том числе при фарингите, ангине, простудных заболеваниях и кашле, сопровождающихся дискомфортом в области горла и хрипотой, острых и хронических респираторных заболеваниях полости носа, околоносовых пазух, носоглотки (инфекционных, атрофических). Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения: Оториноларингология

Показания к применению: профилактика и комплексное лечение острых и хронических респираторных заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носоглотки, полости рта и глотки (инфекционных, атрофических):

- острые и хронические риниты, синуситы, аденоидиты, фарингиты, тонзиллиты
- вазомоторные и субатрофические риниты
- ларингиты, стоматиты, гингивиты, пародонтиты

Профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (гриппа, ОРВИ и т.д.)

Профилактика и комплексное лечение состояний после хирургических вмешательств в полости рта, носа и горле.

Свойства: раствор для орошения и промывания носа и горла на основе раствора коллоидного серебра «SILVER WATER Multiwave» способствуя физическому удалению избытка жидкости и слизи снимает отек и заложенность носа, носовых пазух, рта и глотки

- Уменьшает заложенность и восстанавливает дыхание при насморке;
- Тщательно промывает все отделы полости носа, рта и глотки;
- Оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение;
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа, рта и глотки;
- Увлажняет слизистую носовой полости в условиях чрезмерно сухого воздуха при работе систем центрального отопления, кондиционирования, в условиях неблагоприятной экологической обстановки, а также во время авиаперелетов;
- Уменьшает дискомфорт и сухость в полости рта и горла;
- Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия оболочки полости носа;
- Повышает местный иммунитет.

Коллоидное серебро имеет широкий спектр антибактериальной, противовирусной и противогрибковой активности.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав раствора.

Особые указания:

- Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями.
- Безопасен при проглатывании!

Способ применения

1. Для санации горла:

Носик распылителя поставить в горизонтальное положение и распылить раствор в горло 1 раз, направляя на очаг воспаления. После процедуры сплевывают остатки раствора в раковину, ротовую полость не споласкивают водой, чтобы раствор продолжал действовать 5-10 минут.

2. Для санации носа:

Носик распылителя поставить в вертикальное положение и распылить раствор по 1 разу в каждую ноздрю. Излишки жидкости, попавшие из носа в рот, сплевывают в раковину. Средство должно воздействовать на очаг воспаления не менее 5-10 минут. Повторять процедуру желательно не чаще, чем 1 раз в 2 часа, и не более 5 раз в день.

Внимание: перед применением необходимо встряхнуть флакон!

Побочные эффекты: не выявлены

Меры предосторожности: перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов флакон желательно использовать индивидуально.

Осмотрите препарат и упаковку перед применением. Не используйте раствор в случае нарушения целостности упаковки и самого медицинского изделия.

Форма выпуска и упаковка: раствор во флаконе с насадкой распыляющей и инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия транспортировки: растворы транспортируют в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортировки: температура от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

Условия хранения: хранить в сухом, недоступном для детей месте. Хранение растворов осуществляют при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С при относительной влажности не более 80 % (при плюс 25 °С). Не допускать замерзания.

Срок годности: срок годности раствора для орошения и промывания носа и горла на основе раствора коллоидного серебра «SILVER WATER Multiwave» - 3 года с даты изготовления; срок годности после вскрытия – 12 месяцев.

Не применять после истечения срока годности.

Стерильность: раствор является нестерильным.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Чистая река»
Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Центральная, 49, к. 9

Регистрационное удостоверение МЗ РБ: ИМ-7.111902 от 26.05.2022 г.