

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Капли глазные ОКУТИАРЗ® АЛО+, 10 мл во флаконе №1
(без консервантов)

ОКУТИАРЗ® АЛО+

капли глазные

Без консервантов

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию по применению.

Сохраните данный листок-вкладыш, возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
В случае возникновения дополнительных вопросов, обратитесь к врачу или фармацевту.
Если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Что такое Окутиарз® Ало+?

Окутиарз® Ало+ - это увлажняющий стерильный офтальмологический раствор, не содержащий консервантов. В состав капель входят перекрестно-связанный натрия гиалуронат (0,2%) и Алоэ Вера (0,1%), действие которых направлено на устранение симптомов «сухого глаза», дискомфорта глаз, а также на защиту роговицы.

Состав: перекрестно-связанный натрия гиалуронат 0,2%, порошок геля Алоэ Вера 0,1%, динатрия тетраборат декагидрат, борная кислота, натрия хлорид, вода для инъекций.

Перекрестно-связанный натрия гиалуронат придает раствору высокую вязкоэластичность, что обеспечивает высокую степень увлажнения глазной поверхности, а также долгосрочное облегчение симптомов «сухого глаза».

Алоэ Вера, благодаря своим увлажняющим, противозастойным и смазывающим свойствам, придает раствору высокую увлажняющую способность, улучшая комфорт глаз и увеличивая продолжительность ощущения свежести. Также подтверждена эффективность Алоэ Вера при покраснении или чувствительности глаз, благодаря его выраженному и длительному защитному эффекту.

Для чего применяют Окутиарз® Ало+?

Окутиарз® Ало+ предназначен для устранения симптомов «сухого глаза», раздражения и покраснения, вызванного воздействием окружающей среды или лекарственными препаратами. Может применяться также при ношении контактных линз для увлажнения и комфорта глаз.

Окутиарз® Ало+ полезен во время и после:

- длительного воздействия солнечного света
- воздействия кондиционирования воздуха
- длительного просмотра цифрового экрана

Окутиарз® Ало+ может также помочь облегчить дискомфорт после хирургической операции на глазах.

Как применять Окутиарз® Ало+

Для закапывания в глаз. Не глотать.

Рекомендуемый режим дозирования по 1-2 капли в каждый глаз один или несколько раз в день в соответствии с рекомендациями Вашего врача или фармацевта.

Перед открытием флакона вымойте руки и соблюдайте правила гигиены во время использования.



Избегайте контакта кончика флакона с поверхностью глаза.

1. При первом использовании флакона потяните и полностью удалите ленту-контроль первого вскрытия.
2. Аккуратно сожмите флакон и закапайте 1 каплю в глаз.
3. Плотнo закройте флакон после использования.



Противопоказания

Не применять при возникновении аллергической реакции или при повышенной чувствительности к любому из компонентов Окутиарз® Ало+.

В случае серьезных заболеваний роговицы проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед применением.

Побочные эффекты

Как и в случае применения других глазных капель, возможно появление слабого временного дискомфорта, связанного с инстилляцией продукта.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, СООБЩИТЕ О НИХ ВРАЧУ ИЛИ ФАРМАЦЕВТУ.

Как хранить Окутиарз® Ало+

Хранить при температуре не выше 25°C.

Не замораживать.

Защищать от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Не применять, если упаковка повреждена.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 36 месяцев.

Использовать в течение 90 дней после вскрытия флакона.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска: 1 флакон объемом 10 мл с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Производитель:

OFFHEALTH S.P.A., Via Giovanni Paisiello 10, 50144 Firenze (FI), Италия

на заводе:

C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L., Via Modena 15, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), Италия

Дистрибьютор:

Santen Oy, Финляндия



(BY)

Представитель производителя на территории Республики Беларусь

Представительство компании «Santen Oy» (Финляндия) в Республике Беларусь

220028 г. Минск, ул. Маяковского, 144, пом. 8, каб. 12

Тел.: +375 (17) 316-77-65

Электронная почта: santen@tut.by

Дополнительная информация в виде символов на упаковке

Символ											
Значение	Производитель	Дата производства	Номер серии	Годен до	Стерильно	Хранить при температуре не выше 25°C	Защищать от воздействия тепла и прямых солнечных лучей	Защищать от влаги	Перед применением прочитайте инструкцию по применению	Не применять, если упаковка повреждена	Соответствие требованиям Директив Европейского Союза и гармонизированных стандартов



01.06.2023